

## Guide des tailles - Comment choisir la taille d'EdemaWear

Le choix de la taille de la stockinette est le facteur le plus important pour assurer l'efficacité et le confort d'EdemaWear.

Les étapes suivantes devraient vous aider à choisir la bonne taille de stockinette recommandée par votre professionnel de la santé.

1. Mesurer la circonférence du membre. Mesurer autour de la partie la plus épaisse du membre concerné avec un ruban à mesurer.
2. Choisissez dans le tableau ci-dessous, la taille correspondant à la circonférence maximale du membre. Cela peut être supérieur ou égal au membre que vous venez de mesurer.
3. **Contactez-nous ici** au besoin.

### EdemaWear

Taille et code de produit	Circonférence maximale du membre	Utilisation	Longueur	Rayure
Petit CA600001	45 cm (18 po)	Du pied au genou ou du poignet à l'épaule	55 cm (22 po)	Marine
Moyen CA960001	75 cm (30 po)	Du pied à l'aîne ou du poignet à l'épaule	86 cm (34 po)	Jaune
Grand CA120L001	115 cm (46 po)	Du genou à l'aîne	60 cm (24 po)	Rouge
Très grand CA160XL01	150 cm (60 po)	Du genou à l'aîne	60 cm (24 po)	Aqua

### EdemaWear LITE pour peau sensible

Taille et code de produit	Circonférence maximale du membre	Utilisation	Longueur	Rayure
LITE petit CAL060017	60 cm (24 po)	Pour peau sensible du pied au genou ou du poignet à l'épaule	55 cm (22 po)	Violette
LITE moyen CAL096034	90 cm (36 po)	Pour peau sensible du pied à l'aîne ou du poignet à l'épaule	86 cm (34 po)	Orange

### Conseils utiles

- Les tailles les plus utilisées sont petites et moyennes ;
- La stockinette peut être coupée à la longueur requise ;
- Les petites stockinettes sont vendues en boîte de deux tandis que les autres tailles sont vendues individuellement ;
- Chaque stockinette comporte une rayure de couleur spécifique à chaque taille pour faciliter le reapprovisionnement ;
- EdemaWear ne contient pas de latex de caoutchouc naturel

